



**EZ-ON
PRODUCTS**

303Z

GILET AJUSTABLE A FERMETURE ECLAIR AVEC BOUCLES

Pour vehicules familiaux

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Conforme a la norme FMVSS 213 lorsqu'il est utilise avec des supports EZ-ON compatibles ; modeles 100SMU, 100FM, 100TM.
 - Ne pas utiliser avec des supports non-EZ-ON
- Pour les passagers de plus de 31 lbs
- Les gilets de tailles XS a M sont livres avec des sangles d'entrejambe conformes aux directives de la NHTSA. Les sangles d'entrejambe pour les tailles L et personnalisees doivent etre specifiquement demandees.
- Lorsque des vetements epais, comme des vestes d'hiver, sont portes, le gilet doit etre porte en dessous.
- Accessoires disponibles ; coussinets de cou, sangles de poignet et sangles de bras superieures
- Remplacement recommande : 6 ans apres la date de fabrication.
- Tailles selon les mesures de la poitrine
 - XS 18"- 24" | S 25"- 32" | M 32"- 37" | L 37"- 43" | XL 43"- 49"
- Tailles personnalisees disponibles



Pour les passagers de plus de 31 lbs



AVERTISSEMENT

Un deces ou des blessures graves peuvent survenir si les instructions du fabricant ne sont pas suivies correctement. Veuillez lire les informations d'avertissement ci-dessous pour les recommandations de remplacement.



ENREGISTRER

Enregistrez ce gilet de transport pour etre averti d'un rappel de securite.



GARANTIE

EZ-ON Products soutient les produits que nous fabriquons. La garantie couvre tout defaut de materiel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant la periode de garantie. Nous reparerons ou remplacerons les defauts du produit pendant 1 an a compter de la date de fabrication.


AVERTISSEMENT : Tous les produits EZ-ON sont testes dynamiquement pour repondre aux normes NHTSA. Remplacer le produit s'il est endommage, effiloche ou s'il a ete implique dans un accident. La periode de remplacement recommandee est de six ans. EZ-ON Products n'est pas responsable des blessures si ces recommandations ne sont pas suivies.

PROCEDURE DE TEST DE PINCEMENT

Serrer le gilet de sorte qu'aucun pincement de la sangle ne puisse etre realise sur la sangle de poitrine. Lorsque le gilet est bien ajuste, les doigts ne pourront saisir aucune sangle.



INCORRECT

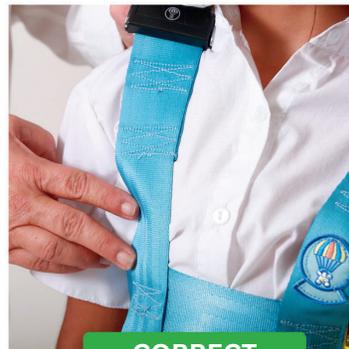

CORRECT

605 Commerce Way West
PO Box 660
Jupiter, FL 33458

561.747.6920
cs@ezonpro.com

EZONPRO.COM



**EZ-ON
PRODUCTS**

303Z

SCANNEZ LE CODE POUR VOIR LA VIDEO

INSTRUCTIONS ET PLUS



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



1. Tenez le gilet pendant que le passager enjambe les sangles d'entrejambe, le logo parachute E-Z-ON® vers l'avant.



2. Choisissez l'une des (3) fermetures éclair qui convient le mieux à l'enfant. Assurez-vous que le gilet est bien ajusté.



3. Gardez la sangle inférieure basse, au niveau des hanches.



4. Ajustez les sangles d'entrejambe pour raccourcir ou allonger. Elles doivent être ajustées, mais pas serrées.



5. Ajustez les bretelles à l'aide des ajusteurs. Tirez la sangle à travers les ajusteurs pour réduire le mou.



6. Ajustez les bretelles à l'aide des ajusteurs. Tirez la sangle à travers l'ajusteur pour réduire le mou.

Remarque : Une sangle d'entrejambe est cousue sur toutes les tailles, sauf la taille Large. Pour la taille Large, passez à l'étape 5.

Remarque : Ne serrez pas trop, car cela ferait remonter le gilet au-dessus des hanches, ce qui pourrait entraîner des blessures.

Remarque : Ne serrez pas trop, car cela ferait remonter le gilet au-dessus des hanches, ce qui pourrait entraîner des blessures.

ETAPE CLE

Faites passer la sangle à travers les glissières pour la bloquer.



Solutions de sécurité exceptionnelles pour le transport d'enfants et d'adultes.