



**EZ-ON  
PRODUCTS**

# 403PB

## GILET REGLABLE A BOUTON-POUSOIR AVEC BOUCLES

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

#### INFO IMPORTANTE

- Conforme a la norme FMVSS 213 lorsqu'il est utilise avec des supports EZ-ON compatibles ; modele 100SMU, 100FM, 100TM.
  - Ne pas utiliser avec des supports non-EZ-ON.
- Pour les passagers de plus de 31 lbs.
- Les gilets de tailles XS-M sont livres avec des sangles d'entrejambe conformes aux directives de la NHTSA. Les sangles d'entrejambe sur les tailles L et personnalisees doivent etre specifiquement demandees.
- Lorsque des vetements epais, comme des vestes d'hiver, sont portes, le gilet doit etre porte en dessous.
- Accessoires disponibles : coussinets de cou, sangles de poignet et sangles de bras superieurs.
- Remplacement recommande : 6 ans apres la date de fabrication.
- Tailles selon les mesures de la poitrine
  - XS 18"-24" | S 25"-32" | M 32"-37" | L 37"-43"
- Tailles personnalisees disponibles



Pour les passagers de plus de 31 lbs



#### AVERTISSEMENT

Un deces ou des blessures graves peuvent survenir si les instructions du fabricant ne sont pas suivies correctement. Lisez les informations d'avertissement ci-dessous pour les recommandations de remplacement.



#### ENREGISTRER

Enregistrez ce gilet de transport pour etre averti d'un rappel de securite.




#### GARANTIE

EZ-ON Products soutient les produits que nous fabriquons. La garantie couvre tout defaut de materiel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant la periode de garantie. Nous reparerons ou remplacerons les defauts du produit pendant 1 an a compter de la date de fabrication.


AVERTISSEMENT : Tous les produits EZ-ON sont testes dynamiquement pour repondre aux normes NHTSA. Remplacez le produit s'il est endommage, effiloche ou s'il a ete implique dans un accident. La periode de remplacement recommandee est de six ans. EZ-ON Products n'est pas responsable des blessures si ces recommandations ne sont pas suivies.

### PROCEDURE DE TEST DE PINCEMENT

Serrez le gilet de sorte qu'aucun pincement dans la sangle ne puisse etre realise sur la sangle de poitrine. Lorsque le gilet est bien ajuste, les doigts ne pourront saisir aucune sangle.

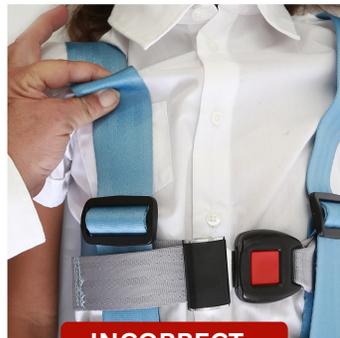

**INCORRECT**

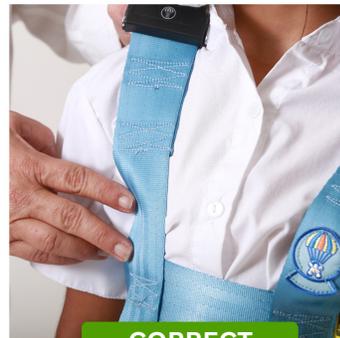

**CORRECT**

605 Commerce Way West  
PO Box 660 Jupiter, FL 33458

**561.747.6920**  
cs@ezonpro.com

**EZONPRO.COM**



**EZ-ON  
PRODUCTS**

# 403PB

SCANNEZ LE CODE POUR VOIR LES  
INSTRUCTIONS VIDEO ET PLUS



## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



1. Tenez le gilet pendant que le passager enjambe les sangles d'entrejambe, le logo E-Z-ON® parachute vers l'avant.



2. Maintenez la sangle inferieure basse, au niveau des hanches.



3. Fermez et fixez les boutons-pression.



4. Serrez les extremités des sangles.



5. Ajustez les sangles d'entrejambe pour les raccourcir ou les allonger afin qu'elles soient ajustees, mais pas serrees.



6. Ajustez les bretelles a l'aide des ajusteurs. Tirez la sangle a travers l'ajusteur pour reduire le mou.

*Remarque : Ne serrez pas trop, car cela entrainerait le soulèvement du gilet au-dessus des hanches, ce qui pourrait entrainer des blessures.*

### ETAPE CLE

Enfilez la sangle a travers les glissieres pour empecher le gilet de se desserrer.  
Veuillez suivre les instructions du fabricant pour le support compatible EZ-ON.



*Solutions de securite exceptionnelles pour le transport d'enfants et d'adultes.*