



**EZ-ON  
PRODUCTS**

## 403PB

### CHALECO AJUSTABLE CON BOTON Y LAZOS

#### INSTRUCCIONES DE INSTALACION

##### INFORMACION IMPORTANTE

- Cumple con FMVSS 213 cuando se utiliza con soportes EZ-ON compatibles; modelo 100SMU, 100FM, 100TM.
  - No utilizar con soportes que no sean EZ-ON
- Para pasajeros de mas de 31 lbs
- Los chalecos de tallas XS-M vienen con correas de entrepierna que cumplen con las directrices de la NHTSA. Las correas de entrepierna en la talla Grande y las personalizadas deben solicitarse especificamente.
- Cuando se use ropa gruesa, como chaquetas de invierno, el chaleco debe usarse debajo.
- Accesorios disponibles: almohadillas para el cuello, correas para las muñecas y correas para la parte superior de los brazos
- Reemplazo recomendado: 6 años despues de la fecha de fabricacion.
- Tallas segun las medidas del pecho
  - XS 18"-24" | S 25"-32" | M 32"-37" | L 37"-43"
- Tallas personalizadas disponibles



Para pasajeros de mas de 31 lbs



#### ADVERTENCIA

Pueden producirse la muerte o lesiones graves si no se siguen correctamente las instrucciones del fabricante. Lea la siguiente informacion de advertencia para conocer las recomendaciones de sustitucion.



#### REGISTRAR

Registre este chaleco de transporte para que se le notifique si hay una retirada de seguridad.



#### GARANTIA

EZ-ON Products respalda los productos que fabricamos. La garantia cubre cualquier defecto de material o mano de obra en condiciones normales de uso durante el periodo de garantia. Repararemos o reemplazaremos los defectos del producto durante 1 año a partir de la fecha de fabricacion.

ADVERTENCIA: Todos los productos EZ-ON se prueban dinamicamente para cumplir con las normas de la NHTSA. Reemplace el producto si esta danado, deshilachado o ha estado en un accidente. El periodo de reemplazo recomendado es de seis años. EZ-ON Products no se hace responsable de las lesiones si no se siguen estas recomendaciones.

#### PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE APRIETE

Apriete el chaleco de manera que no se pueda pellizcar la correa del pecho. Cuando el chaleco este ajustado, los dedos no podran agarrar ninguna correa.



INCORRECTO



CORRECTO



**EZ-ON  
PRODUCTS**

# 403PB

ESCANEE EL CODIGO PARA VER LAS  
INSTRUCCIONES EN VIDEO Y MAS



## INSTRUCCIONES DE INSTALACION



1. Sostenga el chaleco mientras el pasajero introduce las correas de la entrepierna con el logotipo de paracaídas E-Z-ON® hacia el frente.



2. Mantenga la correa inferior baja, a la altura de la cadera.



3. Cierre y asegure los botones de presión.



4. Ajuste bien los extremos de la cincha.



5. Ajuste las correas de la entrepierna para acortar o alargar, de modo que queden ajustadas pero no apretadas.



6. Ajuste las correas de los hombros con los ajustadores. Tire de la cincha a través del ajustador para reducir la holgura.

*Nota: No tire demasiado fuerte, ya que esto hará que el chaleco se levante de las caderas y provoque lesiones.*

### PASO CLAVE

Pase la cincha por las barras deslizantes para evitar que el chaleco se afloje.  
Proceda a seguir las instrucciones del fabricante para el montaje compatible con EZ-ON.



*Soluciones de seguridad excepcionales para el transporte de niños y adultos.*