



**EZ-ON
PRODUCTS**

43YC

CAM DE COCHE CON CORREA DE ENTREPIERNA



TALLA UNICA 31-106 LBS

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

INFORMACION IMPORTANTE

- Cumple con FMVSS213
- La instalacion del 43YC requiere el uso de un anclaje de sujecion.
 - Utilice el anclaje de sujecion instalado de fabrica en el vehiculo (o el kit de herrajes de sujecion de EZ-ON).
 - Si el fabricante del vehiculo indica un limite de peso para el anclaje de sujecion y el nino supera ese peso, instale/utilice el kit de herrajes de sujecion de EZ-ON.
 - Las instrucciones para el kit de herrajes de EZ-ON se incluyen en la bolsa de montaje del kit; las instrucciones en video tambien estan disponibles en ezonpro.com.
- 100H (Kit de herrajes) no incluido.
 - Si sabe que necesitara el 100H, debe solicitarse en el momento de la compra. Sin embargo, se puede comprar por separado si ya tiene el producto.
- Pasajeros que utilizan los sistemas de chaleco de transporte EZ-ON 43YC:
 - Deben pesar mas de 31-106 lbs
 - Deben utilizar un cinturon de seguridad, segun las instrucciones del chaleco.
 - No deben viajar en un asiento elevador.
- Cuando se use ropa gruesa, como chaquetas de invierno, el chaleco debe usarse debajo.
- Se recomienda el reemplazo 6 anos despues de la fecha de fabricacion.



ADVERTENCIA

Pueden producirse la muerte o lesiones graves si no se siguen correctamente las instrucciones del fabricante. Lea la siguiente informacion de advertencia para conocer las recomendaciones de reemplazo.



REGISTRO

Registre este chaleco de transporte para que se le notifique una retirada de seguridad.



GARANTIA

EZ-ON Products respalda los productos que fabricamos. La garantia cubre cualquier defecto en el material o la mano de obra bajo uso normal durante el periodo de garantia. Repararemos o reemplazaremos los defectos del producto durante 1 ano a partir de la fecha de fabricacion.

ADVERTENCIA: Todos los productos EZ-ON se prueban dinamicamente para cumplir con los estandares de la NHTSA. Reemplace el producto si esta danado, deshilachado o ha estado en un choque. El periodo de reemplazo recomendado es de seis anos. EZ-ON Products no se hace responsable de las lesiones si no se siguen estas recomendaciones.

CORTE A LO LARGO DE LA LINEA DE PUNTOS PARA LIBERACION DE EMERGENCIA



100 SCBC EZ-ON
Cortador de Cinturon
de Corte Seguro



605 Commerce Way West PO
Box 660 Jupiter, FL 33458

561.747.6920

cs@ezonpro.com

EZONPRO.COM



**EZ-ON
PRODUCTS**

43YC

ESCANEE EL CODIGO PARA VER
INSTRUCCIONES EN VIDEO Y MAS



INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Consulte el manual del propietario del vehiculo para localizar el soporte de sujecion instalado de fabrica.

La correa de sujecion 43YC se puede girar media vuelta para encajar en ubicaciones de anclaje dificiles.



1. Localice el soporte de anclaje de la correa de sujecion.



2. Conecte el gancho de la correa de sujecion al soporte de anclaje de la correa de sujecion directamente detras del pasajero.

Es aceptable una desviacion de veinte grados desde el centro de la "Y".



3. Apriete tirando de la cinta negra para que el puente en Y se asiente en la parte superior del asiento.



4. Antes de sentar al pasajero, coloque todas las correas en la parte delantera del asiento. Asegurese de que la correa gris este colocada sobre la parte inferior del cojin del asiento.



5. Siente al pasajero sobre la correa gris, de modo que se extienda hacia adelante desde entre las piernas del pasajero.

Coloque las correas negras ajustables delante del cuerpo del pasajero.



6. Pase el cinturón de seguridad del vehiculo a través de la primera correa del pecho, luego la correa de entrepierna gris y luego a través de la segunda correa.



7. Abroche el cinturón de seguridad en la parte baja del regazo y reduzca la holgura del cinturón. Asegurese de que el cinturón de seguridad este en la posición bloqueada.



8. Primero, ajuste la correa de entrepierna gris desde la parte superior del asiento, tirando de la cinta suelta.



9. Ajuste las correas de los hombros tirando hacia abajo de la cinta suelta.



10. Abroche el clip del pecho y colóquelo a la altura de la axila.

ADVERTENCIA: No acorte demasiado las correas de los hombros. Esto puede hacer que el cinturón abdominal quede sobre el estómago y cause lesiones.

Soluciones de seguridad excepcionales para el transporte de niños y adultos.