



**EZ-ON
PRODUCTS**

43YC

SIEGE D'AUTO AVEC SANGLE D'ENTREJAMBES

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INFORMATION IMPORTANTE

- Conforme a la norme FMVSS213
- L'installation du 43YC necessite l'utilisation d'un ancrage de fixation.
 - Utilisez l'ancrage de fixation installe en usine sur le vehicule (ou le kit de fixation EZ-ON).
 - Si le fabricant du vehicule indique une limite de poids pour l'ancrage de fixation et que l'enfant depasse ce poids, installez/utilisez le kit de fixation EZ-ON.
 - Les instructions du kit de fixation EZ-ON sont incluses dans le sac d'assemblage du kit ; des instructions video sont egalement disponibles sur ezonpro.com.
- 100H (Kit de materiel) non inclus.
 - Si vous savez que vous aurez besoin du 100H, il doit etre demande au moment de l'achat. Cependant, il peut etre achete seul si vous avez deja le produit.
- Passagers utilisant les systemes de gilet de transport EZ-ON 43YC :
 - Doivent peser plus de 31 a 106 lbs
 - Doivent utiliser une ceinture de securite, conformement aux instructions du gilet.
 - Ne doivent pas etre installes dans un siege d'appoint.
- Lorsque des vetements epais, comme des vestes d'hiver, sont portes, le gilet doit etre porte en dessous.
- Remplacement recommande 6 ans apres la date de fabrication.



TAILLE UNIQUE 31-106 LBS



AVERTISSEMENT

Un deces ou des blessures graves peuvent survenir si les instructions du fabricant ne sont pas suivies correctement. Lisez les informations d'avertissement ci-dessous pour les recommandations de remplacement.



ENREGISTRER

Enregistrez ce gilet de transport pour etre informe d'un rappel de securite.



GARANTIE

EZ-ON Products soutient les produits que nous fabriquons. La garantie couvre tout defaut de materiel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant la periode de garantie. Nous reparerons ou remplacerons les defauts du produit pendant 1 an a compter de la date de fabrication.

AVERTISSEMENT : Tous les produits EZ-ON sont testes dynamiquement pour repondre aux normes NHTSA. Remplacez le produit s'il est endommage, effiloche ou s'il a ete implique dans un accident. La periode de remplacement recommandee est de six ans. EZ-ON Products n'est pas responsable des blessures si ces recommandations ne sont pas suivies.

COUPER LE LONG DE LA LIGNE POINTILLÉE POUR UNE LIBÉRATION D'URGENCE



100 SCBC EZ-ON
Coupe-ceinture de
securite



605 Commerce Way West
PO Box 660
Jupiter, FL 33458

561.747.6920
cs@ezonpro.com

EZONPRO.COM



**EZ-ON
PRODUCTS**

43YC

SCANNEZ LE CODE POUR VOIR LES
INSTRUCTIONS VIDEO ET PLUS



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Veuillez consulter le manuel du propriétaire du véhicule pour localiser le support d'attache installé en usine.

La sangle d'attache 43YC peut être tournée d'un demi-tour pour s'enclencher sur les points d'ancrage difficiles.



1. Repérez le support d'ancrage de la sangle d'attache.



2. Connectez le crochet de la sangle d'attache au support d'ancrage de la sangle d'attache directement derrière le passager. Un angle de vingt degrés par rapport au centre du << Y >> est acceptable.



3. Serrez en tirant sur la sangle noire de manière à ce que le pont en Y repose sur le dessus du siège.



4. Avant d'asseoir le passager, placez toutes les sangles sur le devant du siège. Assurez-vous que la sangle grise est posée sur le bas du coussin du siège.



5. Asseyez le passager sur la sangle grise, de manière à ce qu'elle s'étende vers l'avant entre les jambes du passager. Placez les sangles noires réglables devant le corps du passager.



6. Passez la ceinture de sécurité du véhicule à travers la première sangle de poitrine, puis la sangle d'entrejambe grise, et enfin à travers la deuxième sangle.



7. Bouclez la ceinture de sécurité en position basse sur les cuisses et réduisez le mou de la ceinture. Assurez-vous que la ceinture de sécurité est en position verrouillée.



8. Ajustez d'abord la sangle d'entrejambe grise depuis le haut du siège, en tirant sur la sangle lâche.



9. Ajustez les bretelles en tirant vers le bas sur la sangle lâche.



10. Attachez l'attache de poitrine et positionnez-la au niveau des aisselles.

AVERTISSEMENT : Ne raccourcissez pas trop les bretelles. Cela pourrait faire remonter la ceinture abdominale sur l'estomac et causer des blessures.

Solutions de sécurité exceptionnelles pour le transport d'enfants et d'adultes.