



**EZ-ON
PRODUCTS**

VESTE HORIZONTALE 503

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Conforme a la norme FMVSS213
- Pour les passagers devant être transportés en position allongée.
- Les passagers utilisant les systèmes de veste de transport EZ-ON, y compris cette veste :
 - Doivent peser entre 22 et 106 lbs
 - Doivent être âgés de plus de 12 mois et avoir un bon contrôle de la nuque.
 - Le passager doit pouvoir s'allonger dans le sens de la longueur sur le siège arrière.
 - Doivent utiliser la ceinture de sécurité, conformément aux instructions de la veste
 - Une couche de rembourrage d'une épaisseur maximale de 2 pouces peut être utilisée sous le passager pour plus de confort.
- Lorsque des vêtements épais, comme des vestes d'hiver, sont portés, la veste doit être portée en dessous.
- Remplacement recommandé 6 ans après la date de fabrication.



**Pour les passagers de plus
de 1 an et de 22 à 106 lbs**



AVERTISSEMENT

Un décès ou des blessures graves peuvent survenir si les instructions du fabricant ne sont pas suivies correctement. Veuillez lire les informations d'avertissement ci-dessous pour les recommandations de remplacement.



ENREGISTRER

Veuillez enregistrer cette veste de transport pour être informé(e) d'un rappel de sécurité.



GARANTIE


EZ-ON Products garantit ses produits. La garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant la période de garantie. Nous réparerons ou remplacerons le produit.

défauts pendant 1 an à compter de la date de fabrication.

AVERTISSEMENT : Tous les produits EZ-ON sont testés dynamiquement pour répondre aux normes de la NHTSA. Remplacer le produit s'il est endommagé, effiloché ou s'il a été impliqué dans un accident. La période de remplacement recommandée est de six ans. EZ-ON Products n'est pas responsable des blessures si ces recommandations ne sont pas suivies.

PROCEDURE DE TEST DE PINCEMENT

Serrer la veste de sorte qu'aucun pincement de la sangle ne puisse être réalisé sur la sangle de poitrine. Lorsque la veste est bien ajustée, il est impossible de saisir la sangle avec les doigts.

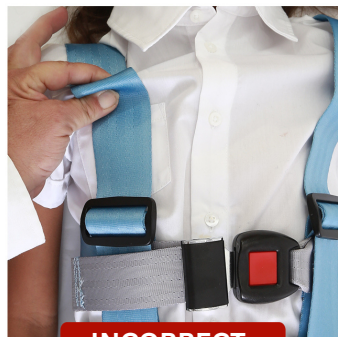

INCORRECT



CORRECT



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

POUR FIXER LE GILET SUR LE PASSAGER




1. Placez le gilet sur le passager, les boucles positionnées à l'avant et la sangle inférieure sur les os de la hanche.



2. Fermez et fixez les boucles à clip.
Serrez les boucles en tirant sur la sangle lâche.



3. Faites passer les sangles d'entrejambe entre les jambes du passager et fixez-les.

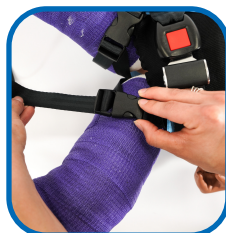

4. Serrez les sangles d'entrejambe pour qu'elles soient bien ajustées, mais pas trop serrées.

Assurez-vous de positionner la sangle de hanche bas et sur les os de la hanche.



5. Enfilez l'extrémité lâche de la bandoulière dans la glissière de la barre en plastique noir.

Ne serrez pas trop, car cela fera remonter le gilet des hanches.



6. Passez à nouveau dans la boucle pour verrouiller en place.

Repetez les étapes 5 et 6 pour la deuxième bandoulière.

POUR FIXER LE PASSAGER SUR LA BANQUETTE ARRIERE

REMARQUE : La banquette arrière du véhicule doit être plate. Le passager doit pouvoir s'allonger sur la banquette arrière dans le sens de la longueur.



7. Allongez le passager sur la banquette arrière, la jambe platée contre le dossier du siège.



8. Faites passer la ceinture de sécurité la plus proche de la tête du passager à travers la sangle de poitrine, bouclez et serrez.



9. Pour les passagers de plus de 30 pouces, faites passer la ceinture de sécurité centrale à travers la sangle de hanche du gilet, bouclez et serrez.



10. Serrez les ceintures de sécurité autant que possible.

Assurez-vous que toutes les ceintures de sécurité sont en position verrouillée.



11. Bouclez la ceinture de sécurité restante la plus proche du genou du passager, en préparant l'étape suivante.

Pour les passagers de moins de 30 pouces, faites passer la ceinture à travers les sangles de poitrine et de hanche du gilet.

Lors de l'utilisation d'une ceinture abdominale/d'épaule, la partie épaule de la ceinture doit être en position verrouillée.



12. Placez la ceinture d'extrémité autour des deux jambes et de la partie abdominale de la ceinture de sécurité déjà bouclée.



13. Bouclez et serrez la ceinture d'extrémité au niveau ou au-dessus du genou du passager.