



**EZ-ON
PRODUCTS**

86Y-CAR CAM

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

INFORMACION IMPORTANTE

- Cumple con FMVSS213
- La instalacion del 86Y requiere el uso de un anclaje de sujecion.
 - Utilice el anclaje de sujecion instalado de fabrica en el vehiculo (o el kit de herrajes de sujecion de EZ-ON).
 - Si el fabricante del vehiculo indica un limite de peso para el anclaje de sujecion y el nino supera ese peso, instale/utilice el herraje de sujecion de EZ-ON.
 - Las instrucciones para el kit de herrajes de EZ-ON se incluyen en la bolsa de montaje del kit; las instrucciones en video tambien estan disponibles en ezonpro.com.
- 100H (Kit de herrajes) no incluido.
 - Si sabe que necesitara el 100H, debe solicitarse en el momento de la compra. Sin embargo, se puede comprar por separado si ya tiene el producto.
- Pasajeros que utilizan los sistemas de chaleco de transporte EZ-ON 86Y:
 - Deben pesar mas de 66 lbs.
 - Deben utilizar un cinturon de seguridad, segun las instrucciones del chaleco.
 - No deben viajar en un asiento elevador.
- Cuando se use ropa gruesa, como chaquetas de invierno, el chaleco debe usarse debajo.
- Se recomienda el reemplazo 6 anos despues de la fecha de fabricacion.



Para pasajeros de mas de 66 lbs



ADVERTENCIA

Pueden producirse lesiones graves o la muerte si no se siguen correctamente las instrucciones del fabricante. Lea la siguiente informacion de advertencia para conocer las recomendaciones de reemplazo.



REGISTRAR

Registre este chaleco de transporte para que se le notifique una retirada de seguridad.



GARANTIA

EZ-ON Products respalda los productos que fabricamos. La garantia cubre cualquier defecto en el material o en la mano de obra bajo un uso normal durante el periodo de garantia. Repararemos o reemplazaremos los defectos del producto durante 1 ano a partir de la fecha de fabricacion.

ADVERTENCIA: Todos los productos EZ-ON se prueban dinamicamente para cumplir con los estandares de la NHTSA. Reemplace el producto si esta danado, deshilachado o ha estado en un choque. El periodo de reemplazo recomendado es de seis anos. EZ-ON Products no se hace responsable de las lesiones si no se siguen estas recomendaciones.

CORTE A LO LARGO DE LA LÍNEA DE PUNTOS PARA LIBERACIÓN DE EMERGENCIA



100 SCRC
Corte Seguro EZ-ON
Cortador de Cinturón



605 Commerce Way West
PO Box 660
Jupiter, FL 33458

561.747.6920
cs@ezonpro.com

EZONPRO.COM



**EZ-ON
PRODUCTS**

CAMARA PARA COCHE 86Y

ESCANEE EL CODIGO PARA VER
INSTRUCCIONES EN VIDEO Y MAS



INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Consulte el manual del propietario del vehiculo para localizar el soporte de sujecion instalado de fabrica. La correa de sujecion 43YC se puede girar media vuelta para encajar en ubicaciones de anclaje dificiles.



1. Localice el soporte de anclaje de la correa de sujecion.



2. Conecte el gancho de la correa de sujecion al soporte de anclaje de la correa de sujecion directamente detras del pasajero. Se aceptan veinte grados desde el centro de la "Y".



3. Coloque el puente en Y en la parte superior del asiento. Apoye las correas negras para los hombros en la parte delantera del asiento.



4. Ajuste el regulador de bloqueo de inclinacion para eliminar el exceso de correas, de modo que el puente en Y se asiente en la parte superior del asiento.



5. Coloque las correas ajustables sobre cada hombro del pasajero.



6. Permita que los extremos de las presillas queden sobre el regazo del pasajero.



7. Pase el cinturón de seguridad del vehiculo por el regazo y a traves de cada presilla.



8. Primero, ajuste la correa de entrepierna gris desde la parte superior del asiento, tirando de la correa suelta.



9. Para ajustar las correas del chaleco para los hombros, deslice la correa hacia arriba o hacia abajo a traves del ajustador. Mantenga ambos ajustadores lo mas cerca posible de los hombros.



10. Asegure el clip de pecho manteniendo el clip debajo de los ajustadores del chaleco al nivel de la axila.

ADVERTENCIA: No acorte demasiado las correas de los hombros. Esto puede provocar que el cinturón abdominal quede sobre el estómago, causando lesiones.

Soluciones de seguridad excepcionales para el transporte de niños y adultos.